

Blepha soft

30 sterile Lidreinigungstücher für die tägliche Reinigung der Augenregion

1. ANWENDUNGSGEBIETE

Blepha soft wird empfohlen für die tägliche Reinigung und Pflege der Augenregion. Die Lidreinigungstücher sind geeignet zur Entfernung von Make-up, Ablagerungen und Krusten von getrocknetem Schleim oder Sekreten aus den Augenlidern und Wimpern, die zu Reizungen führen können.

2. ZUSAMMENSETZUNG

Tuch aus 100% Baumwolle,

Ingredients: Aqua, Polysorbate 20, Xylitol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Aloe barbadensis leaf juice powder, Disodium phosphate, Sodium phosphate, Phenethyl alcohol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA

3. EIGENSCHAFTEN

Blepha soft sterile Lidreinigungstücher sind aus 100%igem Baumwollgewebe. Die Tücher sind getränkt mit einer Lösung, die die empfindliche Augenregion reinigt, regeneriert, erfrischt und beruhigt.

Die Rezeptur enthält Hyaluronsäure und Aloe vera für eine besonders effiziente und schonende Reinigung des empfindlichen Augenbereiches. Sie ist parfümfrei, pH-neutral, frei von Fetten und Ölen und hinterlässt keine Fusseln.

Blepha soft ermöglicht die vollständige Entfernung von Make-up, Ablagerungen und Krusten von getrocknetem Schleim oder Sekreten aus den Augenlidern und Wimpern, die zu Reizungen führen können.

Blepha soft sterile Lidreinigungstücher können aufgrund ihrer Inhaltsstoffe auch täglich für die Pflege der Augenregion verwendet werden. Ohne Konservierungsstoffe (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, Anhang V)

4. ANWENDUNG

Waschen Sie Ihre Hände gründlich, öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie das sterile Lidreinigungstuch, wischen Sie die Augenlider vorsichtig mit dem Tuch ab, um Make-up, Ablagerungen und Krusten von getrocknetem Schleim oder Sekrete und andere Verunreinigungen von den Augenlidern und Wimpern zu entfernen. Für besonders schwer zu entfernende Rückstände empfehlen wir, den geschlossenen Beutel einige Minuten in lauwarmem Wasser (etwa 40 °C) zu erwärmen. Das Lidreinigungstuch anschließend wie eine Kompresse auflegen und die Augenregion damit sanft massieren. Es ist auch möglich, die

Flüssigkeit aus dem Reinigungstuch auf das geschlossene Auge zu drücken. Neigen Sie hierfür den Kopf leicht nach hinten und massieren Sie dann die Augenlider mit dem Tuch, bis die Rückstände vollständig entfernt sind.

Sollten die Augenlider gereizt oder geschwollen sein, ist es ratsam, Blepha soft gekühlt zu verwenden. Kühlen Sie dazu den geschlossenen Beutel für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank und legen Sie das Tuch anschließend für einige Minuten als kalte Komresse auf das geschlossene Auge bevor Sie die Augenregion damit sanft massieren.

5. WARNUNGEN

Die Sterilität des Produktes ist nur gewährleistet, wenn die Verpackung unbeschädigt ist. Kühl und trocken aufbewahren und vor Staub schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei bekannten Überempfindlichkeiten gegenüber Bestandteilen des Produktes oder anderen chemisch verwandten Substanzen darf Blepha soft nicht angewendet werden. Die Anwendung sollte abgebrochen werden, wenn sichtbare Reizungen oder Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Die Wirksamkeit und Sicherheit des Produktes ist nur gewährleistet, wenn die Verpackung unbeschädigt ist.

Auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Bitte entfernen Sie die Kontaktlinsen vor der Verwendung von Blepha soft.

Diese Tücher sind zur einmaligen Verwendung. Um das Kontaminationsrisiko zu vermeiden, verwenden Sie für jedes Auge ein frisches Tuch.

Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.



Hersteller:

Promeia SpA

Corso della Vittoria 1585/1533

I-21042 Caronno Pertusella

Vertrieb:

Pharma Stulln GmbH

Werksstraße 3

92551 Stulln | Deutschland